



Mode d'emploi Accu Chek Compact

Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !

Changement de tambour (bandelettes)



1. Localiser le clip latéral



2. Ouvrir le logement du tambour en couissant le clip latéral



3. Prendre un tambour



4. Insérer le tambour



5. Fermer le logement



6. Vous pouvez contrôler le nombre de bandelettes restantes dans la fenêtre de contrôle

Effectuer un test



1. Ouvrir le clapet de protection de l'écran



2. Appuyer sur le bouton d'enclenchement



3. La bandelette va sortir automatiquement



4. Attendre les instructions pour prélever la goutte



5. Prélever la goutte de sang en aspiration



6. Transcrire le résultat dans le carnet d'autocontrôle



7. Appuyer sur le bouton d'enclenchement pour faire sortir la bandelette



8. Retirer la bandelette sans tirer