

Bienvenue dans la famille des produits ACCU-CHEK. Cet aide-mémoire vous permettra de régler votre glycomètre et vous guidera dans l'exécution d'un test de glycémie. Votre *Manuel d'utilisation* contient des renseignements complémentaires sur d'autres caractéristiques de votre appareil et vous explique comment évaluer les résultats des tests.

Éléments du système d'analyse



Réglage du signal sonore, de l'heure et de la date (Mise en service)

Laissez le glycomètre éteint et appuyez sur la touche **S**. L'appareil s'allume sans pour autant déclencher l'avancement d'une bandelette-test.



L'indication «**On 1**» et le symbole du signal sonore clignotent à l'écran. Cela indique que le signal sonore est activé. Appuyez sur la touche **M** pour désactiver le signal sonore. Appuyez sur la touche **S** pour mémoriser le réglage choisi.

Les deux derniers chiffres de l'année clignotent à l'écran.



Appuyez sur la touche **M** pour modifier l'année.

Appuyez sur la touche **S** pour mémoriser le réglage choisi.

Le glycomètre est pré-réglé en mode 12 heures.



L'heure peut toutefois être affichée soit en mode 12 heures, avec la mention a.m./p.m., soit en mode 24 heures.

Appuyez sur la touche **M** pour modifier le mode d'affichage de l'heure. Appuyez sur la touche **S** pour mémoriser le réglage choisi.

Répétez l'étape précédente pour le réglage des minutes, du mois et du jour.

Une fois le réglage terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Test.



Remarque : Votre nouveau glycomètre est fourni avec des piles déjà en place et un pré-réglage de l'heure et de la date. Il est possible que vous deviez modifier l'heure en fonction du fuseau horaire de votre zone géographique. Il est important de bien régler l'heure et la date si vous utilisez la mémoire du glycomètre ou si vous souhaitez télécharger les résultats sur un ordinateur.

Mise en place ou remplacement de la cartouche de bandelettes-test

Laissez le glycomètre éteint et soulevez le couvercle du compartiment de la cartouche à droite du logement de la bandelette-test.



Le bouton d'ouverture du compartiment de la cartouche fait légèrement saillie, de sorte qu'il est facile à soulever.

Appuyez sur le bouton rouge qui libère la cartouche, peu importe qu'une cartouche de bandelettes-test soit présente dans le glycomètre ou non.




Tenez le glycomètre à la verticale et penchez-le vers l'avant.

La cartouche tombe.



Introduisez une nouvelle cartouche. Refermez le couvercle du compartiment de la cartouche en appuyant dessus. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

Le glycomètre s'allume, effectue automatiquement l'étalonnage, et la cartouche tourne jusqu'à ce que la première bandelette-test soit en position correcte. Puis l'appareil s'éteint.

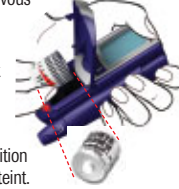

Exécution d'un test de glycémie du bout du doigt



Lavez-vous les mains et essuyez-les.

Appuyez sur la touche Test. L'appareil s'allume et tous les symboles s'affichent rapidement à l'écran. L'avancement d'une bandelette-test s'effectue automatiquement dans les secondes qui suivent.

Remarque : pour effectuer un prélèvement ailleurs que du bout du doigt, veuillez consulter votre *Manuel d'utilisation*.



Appuyez sur le bouton-poussoir de l'autopiqueur jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

Placez l'autopiqueur sur le côté du doigt, puis appuyez sur le bouton-poussoir et relâchez-le.



Tenez le glycomètre de manière à ce que la bandelette-test soit dirigée vers le bas. Assurez-vous de ne pas courber la bandelette-test.

Lorsque le symbole de la goutte de sang clignote, appliquez le sang sur la bandelette. Laissez la goutte de sang en contact avec la bandelette, au niveau de l'encoche noire. Dès qu'une quantité suffisante de sang a été absorbée, **000** s'affiche à l'écran. Les résultats apparaissent au bout de 5 secondes.



Tenez le glycomètre à la verticale au-dessus d'une poubelle. Appuyez sur la touche Test pour éteindre l'appareil et éjecter la bandelette-test.

Pour éjecter la lancette, retirez l'embout bleu. Appuyez sur le bouton-poussoir et laissez tomber la lancette dans un récipient résistant à la perforation. Remettez l'embout bleu sur la lancette en faisant coïncider les encoches. Un dé clic confirme l'enclenchement de l'embout.