

Mode d'emploi

Ascencia DEX



Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !

Changement du disque de bandelette



1. Décrocher la fermeture de l'appareil



2. Ouvrir l'appareil et enlever le disque usagé



3. Placer le nouveau disque



4. Refermer l'appareil

Contrôle de la glycémie



1. Préparer le stylo piqueur



2. Faire glisser le « bouton » sur la gauche et le pousser vers le haut de l'appareil



3. La bandelette apparaît



4. Piquer et aspirer la goutte de sang



5. Relever le résultat de la glycémie dans le carnet d'autocontrôle



6. Faire tomber la bandelette en glissant le « bouton » vers l'affichage