

Mode d'emploi



Precision
X-tra




Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Séparer l'embout du stylo piqueur



2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection

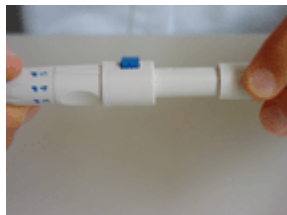

3. Remettre le capuchon et charger



4. Choisir la « force » du stylo piqueur



5. Déchirer le sachet de la bandelette



6. Insérer la bandelette et vérifier le code



7. Piquer



8. Faire aspirer la goutte de sang



8. Relever le résultat de la glycémie dans le carnet d'autocontrôle

9. Piquer la lancette dans le bouchon et la jeter dans un récipient approprié