

Mode d'emploi

One Touch Ultrasoft



Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !



1. Séparer l'embout du stylo piqueur



2. Insérer une lancette et enlever le capuchon de protection



3. Revisser l'embout du stylo




4. Charger



5. Choisir la « force » du stylo



6. Piquer

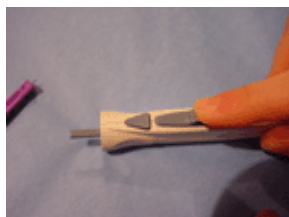

7. Piquer la lancette dans le bouchon et l'éjecter dans un récipient approprié en actionnant le chargeur du stylo vers l'avant

Utilisez soit un container pour déchet dangereux ou une bouteille en PET pour jeter vos aiguilles et vos lancettes.