

## Mode d'emploi simple



# FlexPen

*Novo Nordisk*

**Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !**



1. Enlever le bouchon du stylo



6. Préparer 2-4 Unités d'insuline



2. Mélanger l'insuline



7. Purger, répéter l'opération des point 6 et 7 jusqu'à ce que l'insuline s'écoule



3. Ouvrir l'emballage de l'aiguille



8. Préparer la dose d'insuline prescrite



4. Désinfecter l'embout de l'ampoule



9. Désinfecter la peau, faire un pli et piquer



5. Insérer l'aiguille



10. Injecter en appuyant sur le bout du stylo et **attendre 10 sec.** avant de retirer l'aiguille