

## Mode d'emploi simple

# NovoPen

*Novo Nordisk*



**Avant de commencer un geste de soins, se laver les mains !**



1. Enlever le bouchon du stylo



2. Dévisser le réservoir de l'ampoule



3. Rentrer le piston en appuyant délicatement dessus



4. Insérer l'ampoule et



5. Revisser le réservoir



6. Désinfecter l'embout de l'ampoule



7. Insérer une aiguille



8. Préparer 2 à 4 unités



9. Purger l'aiguille



9. Préparer la dose d'insuline prescrite



10. Désinfecter la peau, faire un pli et piquer



11. Injecter l'insuline et attendre 10 sec avant de retirer l'aiguille